

**ERVA FORA DO
CE DE CRIANÇAS
MAIS DOMÉSTICOS**

evoca queimadura severa a pele aos olhos. Não inale ossóis. Use luvas de proteção, proteção, botas, proteção facial. EM CASO DE LAVE a boca. NÃO provoque o cabelo). Retire imediatamente a contaminada. Lave a pele com um banho. Lave a roupa a antes de usá-la novamente. DE CONTATO COM OS OLHOS: adosamente com água durante tutos. No caso de lentes de o. EM CASO DE INALAÇÃO: pessoa para local ventilado e em imediata. CENTRO DE QUES TOXICOLÓGICA (0800 7222 ABERTURA DE EMBALAGEM: a embalagem em posição vertical derramamento. Gire a tampa até totalmente solta. Após o uso do oloque a tampa no local da n. Lave as mãos cuidadosamente anuseito. Água pode faltar. Não use. ARMazenagem: Conservar o n local coberto e ao abrigo do sol or. Não misture com água na n original. Não aplique em aquecida. Nunca reutilize a n vazia.



**Qualidade
Tecnológica**



TECPON Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda.
CNPJ 00.424.745/0001-88
Rua Nelson Teichmann, 275 - CEP 94830-625
Distrito Industrial - Cachoeirinha - RS - Brasil
Aut. Func. Empresa Nº 3.01780-6
Fone: (51) 3441.6500
www.tecpom.com.br - tecpom@tecpom.com.br
Indústria Brasileira

Químico Responsável:
N. M. Battastini - CRQ 05200204
Serviço de Atendimento
ao Consumidor
0800.510.5377

LOTE:

XXXX
Data Fab: XX/02/2018
Volume: 5 L

TECPON BG 04

**PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.**

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

**RESTRITO AO USO PROFISSIONAL
DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES, FIXAS E ARTIGOS NÃO — CRÍTICOS
ASSISTÊNCIA A SAÚDE**

TECPON BG 04 é um detergente desinfetante para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, equipamentos e produtos médicos não — críticos.
MODO DE USAR: Diluir em água fria ou morna na diluição de 0,25%, ou seja, 2,5ml de produto para 1 litro de água, deixando agir por 10 minutos. Para desinfecção de superfícies fixas: Aplicar o produto deixando em contato com 10 minutos. Enxaguar se necessário. Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar os artigos e deixá — los em imersão por 10 minutos. Os equipamentos que não puderem ser imersos, deverão ter as superfícies mantidas úmidas com o produto, por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos/equipamentos. Utilizá — los o mais breve possível.

Composição química: Princípio ativo: Cloreto de Poli (Hexametileno) 20%,
sinérgica, Alcalinizante, Solventes, tensoativo Aniónico, Tensoativo Catiônico,
veículo.

RISCO II

**Registro no M.S: 317800056
VÁLIDO POR 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO
CONTÉM CLORETO DE ALQUIL DIMETIL AMÔNIO**

1365505/2016-63 = 0305882178-41

APROVADO
27/10/18
REGISTRARIA - MS

Newton Máio Battastini
Representante Legal
Responsável Técnico
CRQ 05200204